



B. BRAUN VET CARE

KNOTENSICHER UND REISSFEST

B. BRAUN NAHTMATERIAL

B. BRAUN VET CARE

FÜR JEDE NAHT DEN RICHTIGEN FADEN

NADEL UND FADEN: ALLER ANFANG MUSS NICHT SCHWER SEIN

Ligaturen, Operieren mit 3D-Kamera, Wundverschluss mit Gewebekleber: Die Zukunft in der Chirurgie hat längst begonnen. Und doch führt an den grundlegenden Techniken kein Weg vorbei. Dazu gehören der sichere Umgang mit Nadel und Faden sowie der korrekte Wundverschluss.

Gerade am Anfang ist das eine ziemliche Herausforderung! B. Braun weiß das aus der engen Zusammenarbeit mit Chirurgen – von Beginn an. Denn schon vor über 100 Jahren entwickelte Carl Braun zusammen mit dem Chirurgen Dr. Franz Kuhn das erste industriell gefertigte sterile Nahtmaterial. Seitdem ist der sichere Umgang mit Nadel und Faden im OP sowohl für Studierende der Veterinärmedizin und junge Tierärzte, als auch für routinierte Kollegen von zentraler Wichtigkeit.

Welches Nahtmaterial eignet sich für welche Indikation? Wie gelingt der korrekte Chirurgische Knoten? Wie gehe ich richtig mit der Nadel um? Fragen, bei denen wir Sie in Ihrem Alltag gerne unterstützen.

Covetrus – Ihr Partner für B. Braun Produkte in der Schweiz.

B. Braun und Covetrus verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, die schon über 40 Jahre währt.



Mehr Informationen zum Thema Nahtmaterial finden Sie unter www.bbraun-vetcare.de oder folgen Sie dem QR Code: www.covetrus.ch/p/b-braun

covetrus 

Einfach und bequem bestellen – Ihr Partner für B. Braun Produkte in der Schweiz.

NAHTMATERIALEMPFEHLUNG

HUND UND KATZE

RESORBIERBAR					
		Monosyn® Quick	Monosyn®	Novosyn®	MonoPlus®
		monofil Glykonat	monofil Glykonat	geflochten beschichtet Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)	monofil Poly-p-dioxanon
Resorbierbar 50 % Reißkraftverlust	kurzfristig	6-7 Tage			
	mittelfristig		14 Tage	21 Tage	
	langfristig				35 Tage
HAUT	Hund: 4/0 - 2/0	+	++	+	++
	Katze: 4/0				
SUBKUTIS	Hund: 4/0 - 3/0	++	++	+	+
	Katze: 4/0 - 3/0				
SCHLEIMHAUT	Hund: 5/0 - 3/0	++	++	+	+
	Katze: 5/0 - 4/0				
MUSKULATUR	Hund: 3/0 - 0	-	++	+	++
	Katze: 3/0 - 2/0				
SEHNEN	Hund: 2/0 - 1	-	-	+	++
	Katze: 3/0 - 2/0				
GELENKKAPSEL	Hund: 3/0 - 0	-	-	+	++
	Katze: 3/0				
DÜNNDARM	Hund: 5/0 - 3/0	+	++	+	++
	Katze: 5/0 - 4/0				
DICKDARM	Hund: 5/0 - 3/0	-	++	+	++
	Katze: 5/0 - 4/0				
BLASE	Hund: 5/0 - 4/0	++	++	+	++
	Katze: 5/0 - 4/0				
UTERUS	Hund: 4/0 - 2/0	++	++	+	+
	Katze: 4/0 - 3/0				
BAUCHWANDVERSCHLUSS	Hund: 3/0 - 1	-	++	+	++
	Katze: 3/0 - 2/0				
LIGATUR	Hund: 3/0 - 0	-	++	++	++
	Katze: 3/0 - 2/0				
LIDRAND	Hund: 5/0 - 4/0	+	++	++	+
	Katze: 5/0 - 4/0				
HERNIEN	Hund: 3/0 - 2/0	-	-	-	++
	Katze: 3/0 - 2/0				

Material der Wahl ++ sehr gut + geeignet - nicht geeignet

Die Produktmarken „Monosyn Quick, Monosyn, Novosyn, MonoPlus, Optilene, Dafilon, Supramid“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

NAHTMATERIALEMPFEHLUNG

HUND UND KATZE

NICHT RESORBIERBAR		Optilene®	Dafilon®	Supramid®
		monofil Polypropylen und Polyethylen	monofil Polyamid	pseudomonofil Polyamid
HAUT	Hund: 4/0 - 2/0	++	++	++
	Katze: 4/0			
SUBKUTIS	Hund: 4/0 - 3/0	-	-	-
	Katze: 4/0 - 3/0			
SCHLEIMHAUT	Hund: 5/0 - 3/0	+	-	-
	Katze: 5/0 - 4/0			
MUSKULATUR	Hund: 3/0 - 0	+	-	-
	Katze: 3/0 - 2/0			
SEHNEN	Hund: 2/0 - 1	++	+	+
	Katze: 3/0 - 2/0			
GELENKKAPSEL	Hund: 3/0 - 0	++	+	+
	Katze: 3/0			
DÜNNDARM	Hund: 5/0 - 3/0	+	-	-
	Katze: 5/0 - 4/0			
DICKDARM	Hund: 5/0 - 3/0	+	-	-
	Katze: 5/0 - 4/0			
BLASE	Hund: 5/0 - 4/0	+	-	-
	Katze: 5/0 - 4/0			
UTERUS	Hund: 4/0 - 2/0	-	-	-
	Katze: 4/0 - 3/0			
BAUCHWANDVERSCHLUSS	Hund: 3/0 - 1	+	+	+
	Katze: 3/0 - 2/0			
LIGATUR	Hund: 3/0 - 0	+	+	+
	Katze: 3/0 - 2/0			
LIDRAND	Hund: 5/0 - 4/0	++	++	-
	Katze: 5/0 - 4/0			
HERNIEN	Hund: 3/0 - 2/0	++	+	-
	Katze: 3/0 - 2/0			

Material der Wahl ++ sehr gut + geeignet - nicht geeignet



VERTRIEB: Provet AG | Gewerbstrasse 1 | 3421 Lyssach
 Telefon: +41 34 448 11 11 | Webseite: www.covetrus.ch | E-Mail: bestellung@covetrus.ch

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de

NAHTMATERIALEMPFEHLUNG

RIND UND KALB

RESORBIERBAR					
		Monosyn® Quick	Monosyn®	Novosyn®	MonoPlus®
		monofil Glykonat	monofil Glykonat	geflochten beschichtet Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)	monofil Poly-p-dioxanon
Resorbierbar 50 % Reißkraftverlust	kurzfristig	6-7 Tage			
	mittelfristig		14 Tage	21 Tage	
	langfristig				35 Tage
DARM	2/0 - 3/0	-	++	+	++
LABMAGEN	2/0	-	++	+	++
PANSEN	2/0 - 0	-	++	+	++
BLINDDARM	2/0 - 0	-	++	+	++
UTERUS	0 - 2	-	++	+	++
BLASE	2/0	-	++	+	++
BAUCHDECKE/ MUSKULATUR	1 - 2	-	++	+	++
MUSKULATUR	2/0 - 2	-	++	+	++
UNTERHAUT	0 - 1	-	++	+	++
HAUT	0 - 2	-	++	+	++
NABELBRUCH	2/0 - 1	-	+	+	++
ZITZENZISTERNE	3/0 - 4/0	++	++	+	+
ZITZENNAHT	2/0 - 0	-	++	+	++
SEHNEN	0 - 2	-	-	-	++
HORNHAUTVERLETZUNGEN	4/0 - 6/0	-	-	++	-

Material der Wahl ++ sehr gut + geeignet - nicht geeignet

Die Produktmarken „Monosyn Quick, Monosyn, Novosyn, MonoPlus, Optilene, Dafilon, Supramid“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

NAHTMATERIALEMPFEHLUNG

RIND UND KALB

NICHT RESORBIERBAR				
		Optilene®	Dafilon®	Supramid®
		monofil Polypropylen und Polyethylen	monofil Polyamid	pseudomonofil Polyamid
DARM	2/0 - 3/0	+	-	-
LABMAGEN	2/0	+	-	-
PANSEN	2/0 - 0	+	-	-
BLINDDARM	2/0 - 0	+	-	-
UTERUS	0 - 2	+	-	-
BLASE	2/0	+	-	-
BAUCHDECKE / MUSKULATUR	1 - 2	+	-	-
MUSKULATUR	2/0 - 2	+	-	-
UNTERHAUT	0 - 1	+	-	-
HAUT	0 - 2	++	++	++
NABELBRUCH	2/0 - 1	++	+	+
ZITENZISTERNE	3/0 - 4/0	-	-	-
ZITZENNAHT	2/0 - 0	++	++	++
SEHNEN	0 - 2	++	+	-
HORNHAUTVERLETZUNGEN	4/0 - 6/0	++	++	-

Material der Wahl ++ sehr gut + geeignet - nicht geeignet



VERTRIEB: Provet AG | Gewerbestrasse 1 | 3421 Lyssach
Telefon: +41 34 448 11 11 | Webseite: www.covetrus.ch | E-Mail: bestellung@covetrus.ch

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de

NAHTMATERIALEMPFEHLUNG

PFERD

RESORBIERBAR					
		Monosyn® Quick	Monosyn®	Novosyn®	MonoPlus®
		monofil Glykonat	monofil Glykonat	geflochten beschichtet Poly(glycolid-co-l-lactid 90/10)	monofil Poly-p-dioxanon
Resorbierbar 50 % Reisskraftverlust	kurzfristig	6-7 Tage			
	mittelfristig		14 Tage	21 Tage	
	langfristig				35 Tage
HAUT	2/0 - 1	-	++	+	++
SUBKUTIS	2/0 - 0	-	++	+	++
SCHLEIMHAUT	2/0 - 0	++	++	+	+
SEHNEN	2/0 - 1	-	-	-	++
GELENKKAPSEL	0 - 1	-	+	+	++
DÜNNDARM	3/0 - 2/0	-	+	+	++
DICKDARM	2/0 - 0	-	+	+	++
BLINDDARM	2/0 - 0	-	+	+	++
BAUCHWANDVERSCHLUSS	0 - 2	-	-	+	++
HERNIEN	1 - 2	-	+	+	++
LIDRAND	3/0 - 4/0	-	++	+	++
HORNHAUTVERLETZUNG	5/0 - 6/0	-	-	++	-

Material der Wahl ++ sehr gut + geeignet - nicht geeignet

Die Produktmarken „Monosyn Quick, Monosyn, Novosyn, MonoPlus, Optilene, Dafilon, Supramid“ sind eingetragene Marken der B. Braun Melsungen AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

NAHTMATERIALEMPFEHLUNG

PFERD

NICHT RESORBIERBAR				
		Optilene® monofil Polypropylen und Polyethylen	Dafilon® monofil Polyamid	Supramid® pseudomonofil Polyamid
HAUT	2/0 - 1	++	++	++
SUBKUTIS	2/0 - 0	-	-	-
SCHLEIMHAUT	2/0 - 0	+	+	+
SEHNEN	2/0 - 1	++	-	-
GELENKKAPSEL	0 - 1	++	-	-
DÜNNDARM	3/0 - 2/0	+	-	-
DICKDARM	2/0 - 0	+	-	-
BLINDDARM	2/0 - 0	+	-	-
BAUCHWANDVERSCHLUSS	0 - 2	+	-	-
HERNIEN	1 - 2	++	-	-
LIDRAND	3/0 - 4/0	++	+	+
HORNHAUTVERLETZUNG	5/0 - 6/0	++	++	-

Material der Wahl ++ sehr gut + geeignet - nicht geeignet



VERTRIEB: Provet AG | Gewerbestrasse 1 | 3421 Lyssach
Telefon: +41 34 448 11 11 | Webseite: www.covetrus.ch | E-Mail: bestellung@covetrus.ch

B. Braun Vet Care GmbH | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | info@bbraun-vetcare.de